

# quick test


## L-Check-1 Ägglossningstest

Quicktest Ägglossningstest är ett självtest som snabbt visar om du har ägglossning. Testet mäter mängden Luteiniserande Hormon (LH) i kvinnans urin. Förekommer en viss nivå av LH är testet positivt.

Observera - Läs instruktionerna noggrant före användning.

Förpackningen innehåller:

- 5st L-Check-1 Ägglossningstest
- Manual på svenska
- Torkmedel (används ej)

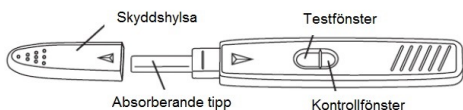

### Varningsföreskrifter och viktig information

Detta är ett in-vitro självtest, det är endast för externt bruk. Får ej förtäras. Läs instruktionerna noggrant före användning. Resultatet kan endast utläsas när instruktionerna följs enligt direktiv. Följ samtliga instruktioner gällande handhavande.

Förvaras mellan 4° C till 30° C. Får ej frysas.  
Förvaras torrt och skyddas mot solljus.

Ska ej användas efter bäst före datum som är markerat med ett timglas på ytterförpackning samt aluminiumförpackning. Testet ska inte användas om aluminiumförpackningen är öppnad. Quicktest Ägglossningstest ska inte återanvändas. Förvara denna produkt utom räckhåll för barn och djur. Ytterförpackning sorteras som kartong/wellpapp. Övrigt ska sorteras som restavfall.

Läs instruktioner innan testet utförs!

**Quicktest har även hälsotester som kan upptäcka problem med prostatan och sköldkörteln. Vi har även tester som indikerar järnbrist. Våra drogtester avslöjar användning av cannabis, opiater och kokain.**

Läs mer på [quicktest.se](http://quicktest.se) - Välkommen!

	Read the instructions before use		For in vitro diagnostic use		Do not reuse
	Store between +4°C and +30°C		Batch number		Expiry date
	Manufacturer				




Manufactured by: VEDALAB  
Rue de l'Expansion,  
ZAT du Loudeau, Cerisé, BP 181,  
61006 ALENCON CEDEX (France)

# quick test

Gör så här:

1. Ta ut testet från aluminiumförpackningen, låt torkmedlet vara kvar.
2. Ta av skyddshylsan, håll den absorberande delen av testet neråt och för in den i urinstrålen i ca 5-10 sekunder. Alternativt urinera i en ren behållare (t.ex. en plastmugg) och därefter ska testet doppas med den absorberande delen i behållaren i ca 10 sekunder.
3. Återplacera skyddshylsan och placera testet med testfönster uppåt på ett plant underlag. Vänta 5 minuter innan testet avläses. Läs inte testet efter 10 minuter.

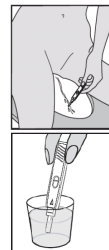

Avläs resultat:

### 1. Positivt resultat



Resultatet är positivt om det vänstra strecket (Testfönster) är mörkare än det högra (Kontrollfönster). Detta betyder att du kommer ha ägglossning inom ca 40 timmar från testets utförande.

### 2. Negativt resultat

Resultatet är negativt om det högra strecket (Kontrollfönster) är mörkare än det vänstra (Testfönster). Du har inte ägglossning. Detta betyder att du bör göra ett nytt test dagen efter.



### 3. Misslyckat resultat

Om ingen linje framträder eller om det endast framträder en linje till vänster så är testet misslyckat och bör kastas. Notera att självtestet då är förbrukat och kan inte återanvändas. Det rekommenderas att ett nytt Quicktest ägglossningstest utförs. Orsaken till att ett test misslyckas kan vara att inte tillräcklig mängd urin har använts. Testet kan också vara kontaminerat av smuts från bristfällig hygien av användare.



# quick test

Frågor och svar

### Hur fungerar ägglossningstestet?

En kvinnas genomsnittliga menstruationscykel är 28 dagar. Hormonet LH (Luteiniserande Hormon) startar ägglossningen. Under menstruationscykeln utsöndras endast en liten mängd av LH men i mitten av cykeln ökar koncentrationen av LH hormonet snabbt. Ägglossning innebär att ägget frisätts genom äggstocken. Ägget kan befruktas inom 12-24 timmar från att det släppts från äggstocken. Därför är det störst sannolikhet att du ska bli gravid om befruktningen sker inom 24-40 timmar efter LH-toppen.

### Jag känner inte till min menstruationscykel, när ska jag göra testet?

Om du inte känner till din menstruationscykel så kan du använda dig av nedan översikt. Du kan också besöka [www.quicktest.se/agglossningskalender/](http://www.quicktest.se/agglossningskalender/). Här får du mer exakt information som kan hjälpa dig. Om du har oregelbunden menstruationscykel kan det vara så att du inte har ägglossning varenda menstruationscykel och det kan vara svårare att räkna ut när din ägglossning ska ske. Du kan isåfall behöva testa flera dagar för att se när du har ägglossning. Blir du inte gravid vid den cykeln du har testat så rekommenderar vi att du testar vid nästkommande cykel om du har oregelbunden menstruation.

### När ska jag utföra testet?

Du kan utföra testet när som helst under dagen. Du bör dock undvika att utföra testet med morgonurin. Nedan schema kan användas som riktlinje.

Cykellängd	Börja testa dag	Cykellängd	Börja testa dag
21-22 dagar	6	32 dagar	15
23-24 dagar	7	33 dagar	16
25 dagar	8	34 dagar	17
26 dagar	9	35 dagar	18
27 dagar	10	36 dagar	19
28 dagar	11	37 dagar	20
29 dagar	12	38 dagar	21
30 dagar	13	39 dagar	22
31 dagar	14	40 dagar	23

### Ska jag använda alla tester i förpackningen?

Nej, du kan sluta använda testet när du har fått positivt resultat.

### Är testresultatet korrekt?

Ja, om testet har utförts enligt instruktioner så är testet korrekt. Om du går på hormonbehandling kan testet visa ett felaktigt resultat. Om du känner att testet är felaktigt bör du alltid konsultera din gynekolog.

### Hur tillförlitligt är ert ägglossningstest?

Tillförlitligheten är 100%. Quicktest ägglossningstest är ansett som ett mycket säkert självtest, det har använts av sjukvården i ca 10 år.

### Kan jag använda testet som ett preventivmedel?

Nej. Detta test ska inte användas i ett preventivt syfte.