

# quick test


## Evidence Graviditetstest

Quicktest Graviditetstest är ett självtest som snabbt visar om du är gravid. Testet mäter mängden human chorion gonadotropin (hCG) i kvinnans urin. Förekommer en viss nivå av hCG är testet positivt.

Observera - Läs instruktionerna noggrant före användning.

Förpackningen innehåller:

- 1st Evidence Graviditetstest
- Manual på svenska
- Torkmedel (används ej)

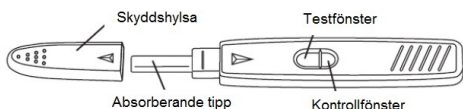

### Varningsföreskrifter och viktig information

Detta är ett in-vitro självtest, det är endast för externt bruk. Får ej förtäras. Läs instruktionerna noggrant före användning. Resultatet kan endast utläsas när instruktionerna följs enligt direktiv. Följ samtliga instruktioner gällande handhavande.

Förvaras mellan 4° C till 30° C. Får ej frysas.  
Förvaras torrt och skyddas mot solljus.

Ska ej användas efter bäst före datum som är markerat med ett timglas på ytterförpackning samt aluminiumförpackning. Testet ska inte användas om aluminiumförpackningen är öppnad. Quicktest Graviditetstest ska inte återanvändas. Förvara denna produkt utom räckhåll för barn och djur. Ytterförpackning sorteras som kartong/wellpapp. Övrigt ska sorteras som restavfall.

### Läs instruktioner innan testet utförs!


**Quicktest har även hälsotester som kan upptäcka problem med prostatan och sköldkörteln. Vi har tester som indikerar järnbrist. Våra drogtester avslöjar användning av cannabis, opiater och kokain.**

Läs mer på [quicktest.se](http://quicktest.se) - Välkommen!

# quick test

## Gör så här:

1. Ta ut testet från aluminiumförpackningen, låt torkmedlet vara kvar.
2. Ta av skyddshylsan, håll den absorberande delen av testet neråt och för in den i urinstrålen i ca 5-10 sekunder. Alternativt urinera i en ren behållare (t.ex. en plastmugg) och därefter ska testet doppas med den absorberande delen i behållaren i ca 10 sekunder.
3. Återplacera skyddshylsan och placera testet med testfönster uppåt på ett plant underlag. Vänta 5 minuter innan testet avläses.

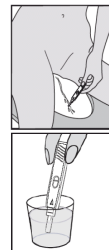

## Avläs resultat:

Styrka, färg eller intensitet i testfönster har ingen inverkan eller betydelse för att utläsa testresultat.

### 1. Positivt resultat



**Två** färgade linjer framträder i testfönstret. Notera att intensiteten i strecken kan variera och att strecken kan vara rosa, ljusrött eller lila, oavsett betyder två streck att du är gravid.

### 2. Negativt resultat

Endast **en** färgad linje framträder. Du är inte gravid.



### 3. Misslyckat resultat

Om ingen linje framträder eller om det endast framträder en linje till vänster så är testet misslyckat och bör kastas. Notera att självtestet då är förbrukat och kan inte återanvändas. Det rekommenderas att ett nytt Quicktest Graviditetstest utförs. Orsaken till att ett test misslyckas kan vara att inte tillräcklig mängd urin har använts. Testet kan också vara kontaminerat av smuts från bristfällig hygien av användare.



# quick test

## Frågor och svar

### Hur snabbt efter befruktning ger testet utslag?

Du kan testa från dagen du skulle fått din mens. Det rekommenderas att använda den första morgonurinen.

### Ska jag testa på morgonen?

Testet kan användas när som helst på dagen men det rekommenderas att testa med morgonurin.

### Kan resultatet vara felaktigt - hur säkert är det?

Testet är 99% säkert. Resultatet är korrekt om instruktionerna har följts. Om testet är negativt och din menstruation uteblir bör du testa på nytt inom några dagar.

### Har linjernas intensitet i testfönstret någon betydelse?

Styrka, färg eller intensitet i kontrollstrecket har ingen inverkan eller betydelse för att utläsa testresultat. Om du kan urskilja en linje ska detta tolkas som en linje.

### Kan jag läsa testet inom 5 minuter?

Nej, läs testet efter exakt 5 minuter. Läs inte resultat efter 10 minuter.

### Kommer testet att vara tillförlitligt om jag avläser testet efter 15 minuter?

Nej. Testet ska avläsas inom 10 minuter efter utspädningsvätskan har droppats i testhålet. Efter 15 minuter är testet inte tillförlitligt och bör kastas.

### Vad gör jag om testet är positivt?

Du bör du kontakta en läkare/barnmorska och förklara att du har gjort ett Quicktest Graviditetstest och att resultatet blev positivt.

Manufactured by :  
VEDA.LAB  
Rue de l'Expansion, ZAT du Londeau,  
Cerisé, BP 181  
61006 ALENCON Cedex - France

	Read the instructions before use		For <i>in vitro</i> diagnostic use		Do not reuse
	Store between +4°C and +30°C		Batch number		Expiry on date
	Manufacturer				